

دستور العمل نصب و راه اندازی تخت مگنت M12 و M24

فیزیوتراپیست گرامی :

با تشکر فراوان از این که محصول شرکت Eie لهستان را خریداری نموده اید ؛ خواهشمند است ابتدا دستور العمل نصب و راه اندازی را مطالعه فرمائید و سپس نسبت به اتصال حلقه سلنویید به تخت اقدام گردد.

وسایل همراه تخت شامل :



- ۱- تخت
- ۲- حلقه سلنویید
- ۳- دستگاه تولید امواج مگنت
- ۴- چهار عدد پیچ شماره هشت
- ۵- دو عدد آچار شماره ۱۳ می باشد.

۱- تخت مگنت (شکل شماره ۱) که برای اتصال حلقه سلنویید ۶۰ سانت برای مگنت مدل M12 و M24 دارای سه قسمت می باشد:

الف) تشک , ب) ریل که مابین تشک و پایه تخت به جهت اتصال حلقه به تخت , ج) پایه تخت



شکل شماره (۱)

- ۲- ابتدا چهار پیچ و مهره که باعث اتصال تشک به تخت را می باشد و در چهار طرف تخت می باشد را با دو آچار شماره ۱۳ باز کرده و این باعث می شود تشک از تخت جدا گردد (شکل شماره ۲)



(شکل شماره ۲)

- ۳- پس از باز کردن چهار پیچ در اطراف تخت ؛ تشک را از روی چهار پایه تخت برداشته و در کناری قرار دهید (دقت نمائید دقیقا بعد از نصب حلقه سلنویید ؛ دوباره تشک را بر سر جای قبلی قرار دهید ؛ بسیار مهم است که تشک دوباره به همان جای قبلی نصب گردد ؛ در صورتی که احتمال اشتباه می دهید بهتر است دو قسمت را با مائیک رنگی مشخص کرده تا دوباره بر سر جای خود قرار گیرد) (شکل شماره ۳)



حتما این دو قسمت
در زمان جابجایی
مشخص شود که
دقیقا بر جای قبلی
قرار گیرد.

(شکل شماره ۳)

۴- پس از برداشت تشک؛ حالا شما پایه تخت و ریلی را مشاهده می نمایید کم قرار است حلقه سلنویید بر روی آن قرار گیرد، این ریل دارای چهار حفره و حلقه نیز دارای چهار حفره به جهت اتصال پیچ به حلقه می باشد، ابتدا حلقه سلنویید را بر روی ریل گذاشته و دقت نمایید که دقیقا چهار حفره ریل و حلقه سلنویید منطبق بر هم قرار گیرد؛ شما با چهار پیچ شماره ۸ و آچار شماره ۱۳ که در اختیار شمار قرار گرفته است ابتدا به آرامی هر پیچ را در داخل حفره قرارداد و سعی نمایید همزمان چهار پیچ را با همدیگر ببندید. (شکل شماره ۴ و ۵ و ۶)



(شکل شماره ۵)



(شکل شماره ۴)



بستن پیچ ریل به حلقه سلنویید

(شکل شماره ۶)

۵- حالا تشک را با کمک یک نفر از وسط حلقه سلنویید عبور داده (دقت شود پایه تشک به بدنه حلقه برخورد نکند که باعث زخمی شدن حلقه گردد) و دقیقاً بر روی چهار چوپ تخت که قبلاً مشخص شده است قرار گیرد. و پس از قرار گرفتن به آرامی چهار پیچ اطراف تشک به بدنه چهارچوب تخت با دو آچار شماره ۱۳ که همراه تخت می باشد بسته شده و سعی شود هر چهار پیچ همزمان متصل گشته و سفت گردد. پس از اتصال کامل لطفاً به صورت مرتب چندین بار حلقه را حرکت داده تا بلبرینگ در داخل ریل به راحتی به حرکت در بیاید. و همچنین سالیانه نسبت به تمیز کردن ریل و همچنین گریس کاری بلبرینگ توسط گریس اقدام گردد.



فیزیوتراپیست گرامی :

در صورت هر گونه سوال و یا ابهام در مورد نحوه اتصال حلقه سلنویید به تخت مگنت حتما در ساعات اداره با شماره های ۸۸۸۱۲۳۶۵ تماس حاصل فرمائید.

با تشکر

بخش سرویس و خدمات پس از فروش شرکت تین طب

تلفن : ۸۸۸۱۲۳۶۵ - ۰۲۱

www.teenteb.com